

Інструкція з використання

Фільтри Oosafe®

Oosafe®

Документ № OOFL-17
Дата оновлення: 22.06.2017

Увага!

- Перевіряйте термін придатності, вказаний на наліпці
- Температура зберігання становить 5 – 30°C
- Максимальний тиск – 2 бар, рекомендований тиск < 1,5 бар
- Збільшуйте/зменшуйте тиск повільно
- Не піддавайте впливу прямих сонячних променів
- Оглядайте, чи пластмасове пакування фільтра Oosafe® повністю опломбоване
- Фільтри Oosafe® виготовлені з поліпропілену (PP) та придатні для повторної переробки. Заради збереження довкілля рекомендується ліквідувати фільтри згідно з місцевими нормативами.



- Пластмаса є займистою. Тримайте подалі від вогню.



- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використання продукту.

Фільтр Oosafe®

- Фільтр Oosafe® захищає ооцити, ембріони та сперму в забезпечуваних газами середовищах від таких забруднювачів, як леткі органічні сполуки (ЛОС), хімічно-активні забруднювачі (ХАЗ), запахи, бактерії, пил та шкідливі частки.
- Фільтр Oosafe® складається з високоякісного повітря, сильно насиченого макрочастками (HEPA), та спеціально спроектованого активного вуглецевого фільтра. Окрім часток, фільтр HEPA призначений для затримання бактерій впродовж 3 місяців. Активні частки вуглецю всередині фільтра мають малі розміри, щоб між ними залишалося якомога менше вільного простору, завдяки чому збільшується ефективна робоча площа та подовжується термін захисту від шкідливих забруднювачів.
- Фільтр Oosafe® рекомендується замінювати кожні 3 місяці, бо даний виріб гарантує затримку ЛОС, ХАЗ, часток і запахів у капсулах фільтра впродовж 3 місяців з моменту відкриття герметичного пластмасового пакування.
- Фільтр Oosafe® має маркування ЄС і виготовляється в умовах чистої кімнати згідно із Сучасною належною виробничою практикою із дотриманням жорстких вимог для використання в лабораторіях ЕКЗ.
- Фільтр Oosafe® пакується окремо й транспортується у вигляді чотирьох деталей у картонній коробці, до якої також вкладається сертифікат про відповідність нормативам.

Інструкції з використання:

1. Перевірте, чи пластикове пакування фільтра Oosafe® повністю герметичне та непошкоджене. Не використовуйте фільтр, якщо він неналежно запакований або якщо пакування проколоте.
2. Обріжте край герметичного пластмасового пакування в чистих умовах, бажано в лабораторії, та дістаньте з нього фільтр Oosafe®.
3. Натисніть металеву деталь з боку оснащення, щоб від'єднати фільтр Oosafe® від газової трубки.
4. Для забезпечення найкращих робочих характеристик використовуйте оригінальне оснащення. Оригінальне оснащення блокуватиме потік газу при заміні фільтра. Можна легко змінювати фільтр під час роботи інкубатора та протікання газу.
5. Дістаньте старий фільтр Oosafe® з оригінального тримача та замініть його новим. Негайно ліквідуйте старий фільтр.
6. Фільтр Oosafe® слід завжди тримати у вертикальному положенні за допомогою оригінального тримача. Це не дасть газівій трубці перегинатися, що інакше може призвести до небажаного блокування потоку газу. На задній стороні тримача є магніт, за допомогою якого його можна помістити на стінку інкубатора або на будь-яку металеву поверхню.
7. Розміщуючи тримач на інкубаторі або будь-якій металевій поверхні, стежте, щоб намальована на тримачі стрілка була направлена вгору.
8. Дотримуйтеся знаків «До джерела газу – Вхід» та «До інкубатора – Вихід» на наліпці фільтра Oosafe®, щоб встановити фільтр у правильному напрямку.



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО!

Фільтр Oosafe® ST

- Фільтр Oosafe® ST захищає ооцити, ембріони та сперму в забезпечуваних газами середовищах від таких забруднювачів, як леткі органічні сполуки (ЛОС), хімічно-активні забруднювачі (ХАЗ), запахи, бактерії, пил та шкідливі частки.
- Фільтр Oosafe® ST складається з високоякісної мембрани з політетрафторетилену (ПТФЕ) товщиною 0,2 мк (повне видалення та затримання бактерій з ефективною фільтрацією 10^7 колонієутворюючих одиниць / см^2 згідно з методологією Асоціації виробників в галузі охорони здоров'я) та спеціально спроектованого активного вуглецевого фільтра. Крім того, ПТФЕ-фільтр призначений для затримання бактерій протягом періоду до 6 місяців. Активні частки вуглецю всередині фільтра мають малі розміри, щоб між ними залишалося якомога менше вільного простору, завдяки чому збільшується ефективна робоча площа та продовжується термін захисту від шкідливих забруднювачів.
- Фільтр Oosafe® ST рекомендується замінювати кожні 6 місяців, бо даний виріб гарантує затримку ЛОС, ХАЗ, часток і запахів у капсулах фільтра впродовж 6 місяців з моменту відкриття герметичного пластмасового пакування.
- Фільтр Oosafe® ST має маркування ЄС і виготовляється в умовах чистої кімнати згідно із Сучасною належною виробничою практикою із дотриманням жорстких вимог для використання в лабораторіях ЕКЗ.
- Фільтр Oosafe® ST пакується окремо й транспортується у вигляді чотирьох деталей у картонній коробці, до якої також вкладається сертифікат про відповідність нормативам.

Інструкції з використання:

1. Перевірте, чи пластикове пакування фільтра Oosafe® ST повністю герметичне та непошкоджене. Не використовуйте фільтр, якщо він неналежно запакований або якщо пакування проколоте.
2. Обріжте край герметичного пластмасового пакування в чистих умовах, бажано в лабораторії, та дістаньте з нього фільтр Oosafe® ST.
3. Натисніть металеву деталь з боку оснащення, щоб від'єднати фільтр Oosafe® ST від газової трубки.
4. Для забезпечення найкращих робочих характеристик використовуйте оригінальне оснащення. Оригінальне оснащення блокуватиме потік газу при заміні фільтра. Можна легко змінювати фільтр під час роботи інкубатора та протікання газу.
5. Дістаньте старий фільтр Oosafe® ST з оригінального тримача та замініть його новим. Негайно ліквідуйте старий фільтр.
6. Фільтр Oosafe® ST слід завжди тримати у вертикальному положенні за допомогою оригінального тримача. Це не дасть газовій трубці перегинатися, що інакше може призвести до небажаного блокування потоку газу. На задній стороні тримача є магніт, за допомогою якого його можна помістити на стінку інкубатора або на будь-яку металеву поверхню.
7. Розміщуючи тримач на інкубаторі або будь-якій металевій поверхні, стежте, щоб намальована на тримачі стрілка була направлена вгору.
8. Дотримуйтеся знаків «До джерела газу – Вхід» та «До інкубатора – Вихід» на наліпці фільтра Oosafe® ST, щоб встановити фільтр у правильному напрямку.



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО!



Використовувані умовні позначення

Позначення	Пояснення
	Виробник
	Термін придатності
	Номер партії
	Логотип ЄС
	Див. інструкцію з використання
	Уникати вологи
	Температурний діапазон
	Не використовувати, якщо пакування розкрито або пошкоджено



Виробник: «СпарМЕД АпС»
Риттермаркен 2, DK-3520, м. Фарум,
Данія Електронна пошта:
info@sparmed.dk Тел.: +45 39 40 25 03
www.sparmed.dk

Інструкція з використання

Фільтри Oosafe®



Безпека в лабораторіях ЕКЗ

Oosafe®

Документ № OOFL-17

Дата оновлення: 22.06.2017

Умовні позначення на наліпці внутрішнього пакування



Умовні позначення на наліпці зовнішнього пакування

виробу



Безпека в лабораторіях ЕКЗ

«СпарМЕД Апс», Риттермаркен 2, DK-3520, м. Фарум, Данія, реєстраційний № DK 30898575